

SILVERCREST®



www.lidl-service.com



APPAREIL DE MASSAGE À VENTOUSE SVM 3.7 A1

FR BE

APPAREIL DE MASSAGE À VENTOUSE

Mode d'emploi et consignes de sécurité

DE AT CH

VAKUUM-MASSAGEGERÄT

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

IAN 313165

FR



FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR / BE	Mode d'emploi et consignes de sécurité	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise	Seite	19

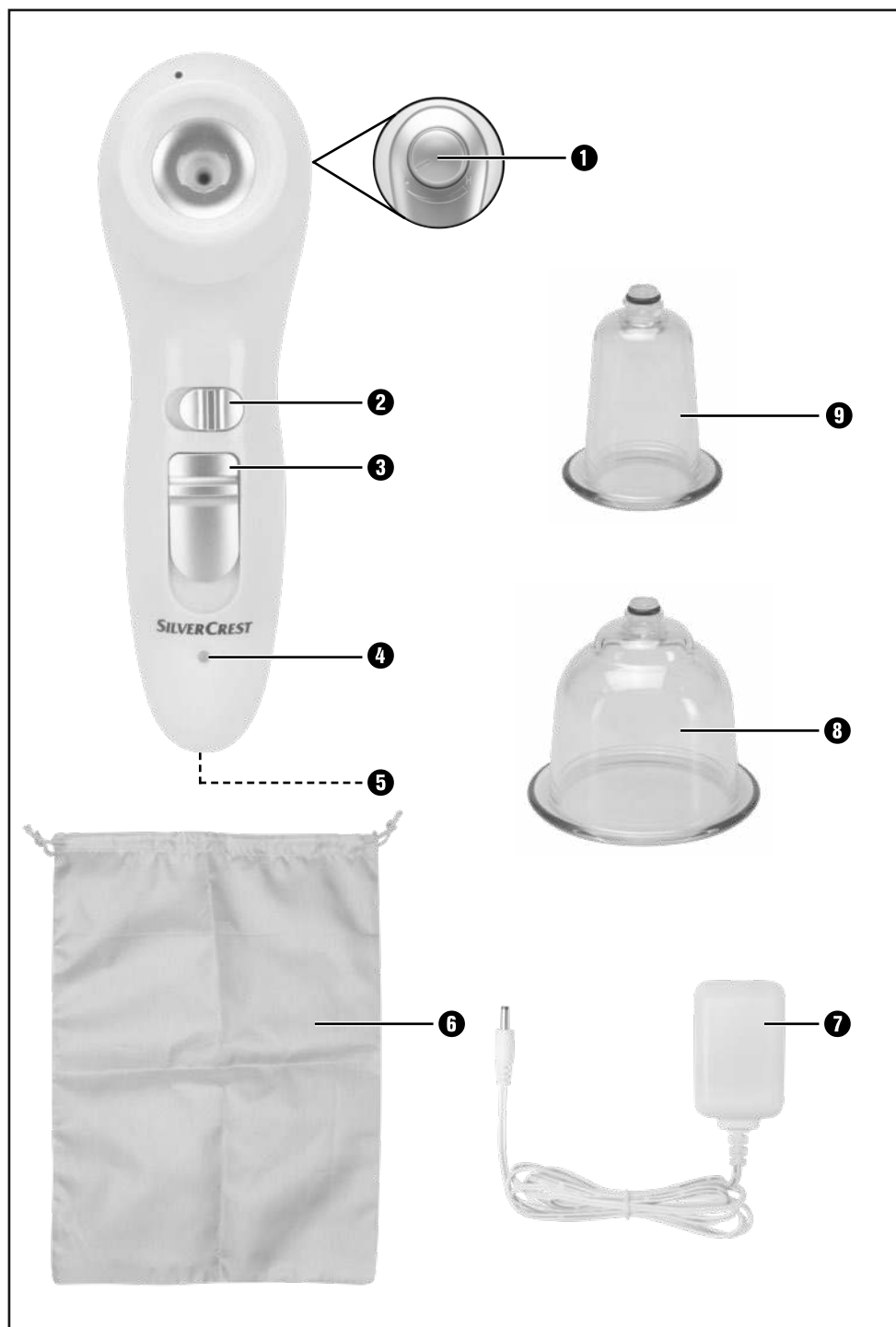


Table des matières

Introduction	2
Utilisation conforme à l'usage prévu	2
Matériel livré	3
Description de l'appareil	3
Consignes de sécurité	4
Mode de fonctionnement	7
Avant la première utilisation	7
Utilisation	8
Ventouses	9
Programmes	9
Exemples d'utilisation	10
Visage	10
Ventre / taille	10
Ventre / dos	11
Jambes	11
Fessiers	11
Décolleté	12
Bras	12
Nettoyage	12
Rangement	12
Recyclage	13
Recyclage de l'adaptateur secteur / de l'appareil	13
Recyclage de l'emballage	13
Annexe	14
Caractéristiques techniques	14
Garantie de Kompernass Handels GmbH	15
Service après-vente	18
Importateur	18

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus.

Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil est destiné à masser la peau par le vide.

L'appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans un cadre privé et n'est pas destiné à un usage médical ou commercial. Le traitement avec l'appareil ne saurait remplacer un traitement médical. N'utilisez pas l'appareil sur les animaux.

L'appareil est exclusivement destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des pièces sèches.

AVERTISSEMENT

Danger résultant d'une utilisation non conforme !

L'appareil peut présenter un danger en cas d'utilisation non conforme et / ou d'usage différent.

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement de manière conforme à sa destination.
- ▶ Respectez les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Matériel livré

L'appareil est livré équipé de série avec les composants suivants :

- Appareil de massage à ventouse
- 2 ventouses
- Adaptateur secteur
- Pochette de rangement
- Mode d'emploi

DANGER

- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés comme des jouets par les enfants. **Il y a un risque d'étouffement.**

- ◆ Sortez du carton toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- ◆ Retirez l'ensemble du matériel d'emballage.

REMARQUE

- Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou liés au transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Description de l'appareil

(Figures : voir le volet dépliant)

- ❶ Bouton rotatif
- ❷ Interrupteur Marche/Arrêt
- ❸ Sélecteur de programmes
- ❹ Voyant de contrôle
- ❺ Prise pour l'adaptateur secteur
- ❻ Pochette de rangement
- ❼ Adaptateur secteur
- ❽ Grande ventouse
- ❾ Petite ventouse

Consignes de sécurité

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- ▶ N'utilisez et ne chargez l'appareil qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- ▶ Raccordez l'appareil uniquement à une prise secteur correctement installée et reliée à la terre. La tension secteur doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil/de l'adaptateur secteur.
- ▶ Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas mouillé ou humide pendant le fonctionnement. Acheminez-le afin qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- ▶ Maintenez le cordon d'alimentation éloigné de surfaces brûlantes.
- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil et n'effectuez pas vous-même de réparation. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie. Confiez les réparations de l'appareil défectueux uniquement à un technicien spécialisé habilité.
- ▶ En cas de défaillances et avant de nettoyer l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- ▶ Ne portez et ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation.
- ▶ Faites remplacer immédiatement les fiches secteur, les cordons d'alimentation ou l'adaptateur secteur endommagé par des techniciens spécialisés autorisés ou par le service clientèle pour éviter tout risque.

⚠ RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- ▶ N'utilisez pas cet appareil dans le bain ou sous la douche. Ne stockez ou ne conservez pas l'appareil à des endroits d'où il peut tomber dans la baignoire ou le lavabo.
- ▶ N'approchez jamais les mains d'un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation est abîmé, lorsque l'adaptateur secteur est défectueux, lorsque l'appareil ne fonctionne pas impeccablement, lorsqu'il est tombé par terre ou dans l'eau ou qu'il a été endommagé.
- ▶  N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans de l'eau ni dans d'autres liquides !

**⚠ AVERTISSEMENT !
RISQUE DE BLESSURES !**

- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en aient compris les dangers.
- ▶ Il est interdit aux enfants de nettoyer ou d'entretenir l'appareil sans surveillance.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- ▶ N'utilisez jamais l'appareil sur les animaux.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ L'appareil ne doit pas être utilisé en cas de : maladies cardiovasculaires graves, d'insuffisance hépatique ou rénale chronique, de maladies de la peau, de varices, de plaies ouvertes, de cicatrices chirurgicales récentes, de grossesse.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil sous des couvertures ou coussins.
- ▶ Arrêtez immédiatement toute utilisation de l'appareil si vous la ressentez comme désagréable ou si vous avez des douleurs.
- ▶ Ne traitez pas trop longtemps la même partie du corps, ni trop fort, ni plusieurs fois de suite.
- ▶ Une utilisation incorrecte ou excessive peut entraîner des hématomes certes inoffensifs mais inesthétiques.
- ▶ N'utilisez l'appareil que conformément à sa destination.

ATTENTION - RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- ▶  Utilisez l'adaptateur secteur et l'appareil uniquement dans des locaux intérieurs.
- ▶ N'utilisez pas trop de crème ou d'huile lors de l'utilisation de l'appareil. Cela risque d'entraver les fonctions de l'appareil et d'en réduire la durée de vie.
- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou corrosifs. Ils risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Mode de fonctionnement

Lors du massage par le vide, les tissus sont stimulés sous l'effet de la formation d'une dépression. Les couches cutanées ne sont pas comprimées comme lors d'un massage par pétrissage habituel, mais séparées et étirées sous l'effet de la dépression.

Cela permet d'atteindre les couches tissulaires plus profondes et de mieux stimuler les circuits sanguins et lymphatiques. L'apport nutritionnel de la peau est amélioré et la dépuración des tissus est favorisée.

Avant la première utilisation

- ◆ Nettoyez l'appareil comme indiqué au chapitre **Nettoyage**.
- ◆ Chargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser la première fois :
 - Reliez l'adaptateur secteur ⑦ et la prise ⑤ de l'appareil et enfichez l'adaptateur secteur ⑦ dans une prise de courant. Le voyant de contrôle ④ est allumé en rouge pendant le chargement.
 - Laissez l'appareil charger pendant **quatre** heures et débranchez-le ensuite du réseau électrique si vous ne souhaitez plus l'utiliser.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé. Avant de commencer, informez-vous obligatoirement au chapitre **Utilisation** sur le maniement en toute sécurité de l'appareil afin d'éviter toute blessure.

REMARQUES

- ▶ Le voyant de contrôle ④ s'éteint dès que l'appareil est entièrement chargé. Laissez cependant l'appareil branché au réseau électrique pendant toute la durée recommandée avant la première utilisation.
- ▶ Si la batterie est déchargée, le voyant de contrôle ④ s'allume en rouge. L'appareil s'éteint au bout de 15 secondes environ. Branchez l'appareil au réseau électrique et rechargez-le.
- ▶ Vous pouvez également utiliser l'appareil pendant le chargement. Ne l'utilisez cependant pas pendant le premier chargement.

Utilisation

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

Afin d'éviter les hématomes :

- ▶ Assurez-vous avant la mise en marche que l'intensité la plus faible est réglée (bouton rotatif **1** sur "L" = LOW, puissance d'aspiration faible). Commencez toujours par l'intensité la plus faible et augmentez progressivement si nécessaire (bouton rotatif **1** direction "H" = HIGH, puissance d'aspiration forte).
- ▶ Procédez avec une prudence particulière lors du traitement des zones corporelles sensibles et flasques, comme par ex. le visage !
- ▶ Ne traitez pas trop longtemps la même partie du corps, ni trop fort, ni plusieurs fois de suite.
- ▶ Chaque corps réagit différemment. Si l'utilisation vous est désagréable, réduisez l'intensité d'aspiration, changez la zone corporelle ou arrêtez complètement le traitement.

REMARQUE

- ▶ Utilisez l'appareil un jour sur deux jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.
- ▶ Utilisez l'appareil uniquement sur les zones corporelles présentant un tissu adipeux suffisant. L'utilisation sur des zones non grasses n'a quasiment aucun effet et est ressentie en règle générale comme désagréable.
- ▶ Frottez les zones à traiter avec un produit cosmétique formulé à l'huile (par ex. huile pour bébé) pour que l'appareil glisse plus facilement sur la peau.
- ▶ Vous pouvez stopper le vide à tout moment en appuyant sur le bouton rotatif **1**.
- ◆ Montez la ventouse **8 9** adaptée. Voir pour cela le chapitre **Ventouses**.
- ◆ Sélectionnez le programme adapté à l'aide du sélecteur de programmes **3**. Voir pour cela le chapitre **Programmes**.
- ◆ Assurez-vous que le bouton rotatif **1** se trouve si nécessaire sur "L" (= LOW, puissance d'aspiration faible).
- ◆ Maintenez l'ouverture de la ventouse **8 9** sur la zone à traiter et glissez l'interrupteur Marche/Arrêt **2** sur "ON". Le voyant de contrôle **4** s'allume en vert en mode batterie ou en orange lorsque l'appareil est parallèlement chargé. L'appareil se met immédiatement à aspirer l'air et un vide se crée dans la ventouse **8 9**.
- ◆ Déplacez l'appareil sur la peau conformément aux mouvements décrits au chapitre **Exemples d'utilisation**.
- ◆ Passez à une zone voisine lors de la pause d'aspiration. Veillez à ce que les zones ne se chevauchent **pas**. La même zone ne doit jamais être traitée plusieurs fois de suite !

- ◆ Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur Marche/Arrêt **2** sur "OFF". Le voyant de contrôle **4** s'éteint.
- ◆ Retirez la ventouse **8** **9** de l'appareil.
- ◆ Nettoyez les ventouses utilisées comme indiqué au chapitre **Nettoyage**.

Ventouses

Deux ventouses différentes sont comprises dans la livraison :

Petite ventouse

La petite ventouse **9** convient au traitement de petites zones corporelles, comme par ex. le visage.

Grande ventouse

La grande ventouse **8** est prévue pour le traitement de plus grandes zones comme le ventre, les jambes et le dos.

Procédez comme suit pour monter les ventouses sur l'appareil :

- ◆ Placez la ventouse **8** **9** dans la tête de l'appareil de manière à ce que les crans placés sur la ventouse **8** **9** glissent dans les évidements dans la tête de l'appareil, et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que la ventouse **8** **9** s'enclenche.
- ◆ Pour retirer à nouveau la ventouse **8** **9**, tournez-la dans le sens anti-horaire jusqu'à pouvoir la détacher de la tête de l'appareil.

Programmes

L'appareil dispose de quatre programmes préétablis avec une durée d'aspiration respectivement différente :

Programme 1 (P1)

Aspiration 2 secondes, pause d'aspiration 1 seconde

Sélectionnez **P1** pour toutes les zones corporelles sensibles et flasques (par ex. le visage, la face intérieure des bras etc.), surtout pour les premières utilisations. Si ces zones réagissent positivement au traitement, vous pouvez également utiliser **P2** après quelques essais.

Programme 2 (P2)

Aspiration 4 secondes, pause d'aspiration 2 secondes

Appuyez sur **P2** une fois familiarisé avec l'appareil et si vous pensez pouvoir augmenter le temps d'aspiration. Si vous n'êtes pas sûr, mieux vaut commencer avec **P1**.

Programme 3 (P3)

Aspiration 6 secondes, pause d'aspiration 2 secondes

Choisissez **P3** pour les zones corporelles fermes. Si vous n'êtes pas sûr, mieux vaut commencer avec **P2**.

Programme 4 (P4)

Aspiration continue, pas de pause d'aspiration

Ce programme vous permet d'adapter le traitement à vos besoins. Choisissez **P4** uniquement si vous avez acquis suffisamment d'expérience avec l'appareil et savez comment votre corps réagit au traitement. Vous pouvez stopper le vide en appuyant sur le bouton rotatif ❶.

Exemples d'utilisation

Ce chapitre présente différents exemples d'utilisation pour les parties corporelles possibles. Suivez ces exemples pour un résultat optimal.

Commencez toujours par la durée d'aspiration la plus faible (par ex. **P1** au lieu de **P2**) et par l'intensité d'aspiration la plus basse (bouton rotatif ❶ sur "L"), surtout si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience avec l'appareil.

Les images illustrent respectivement le traitement pour une moitié de corps.

Répétez le traitement de la même manière sur l'autre partie du corps.

Les flèches sur les figures indiquent le sens du mouvement dans lequel vous devez effectuer le traitement. Pour les zones difficilement accessibles, pour le dos par exemple, il peut être utile de demander de l'aide à une seconde personne.

Visage


Choisissez exclusivement le programme **P1**, le visage est en règle générale très sensible.




Partez toujours du centre du visage en vous dirigeant vers l'extérieur.

Ventre / taille

Choisissez le programme **P1** ou **P2** pour les parties du corps les plus flasques. Traitez le reste des parties avec **P2** ou **P3**.

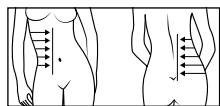

Progressez horizontalement de l'extérieur vers le centre du corps.

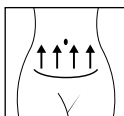


Progressez verticalement de bas en haut.

Ventre / dos

Choisissez le programme **P1** ou **P2** pour les parties du corps les plus flasques.
 Traitez le reste des parties avec **P2** ou **P3**.



Partez de l'extérieur et progressez respectivement de bas en haut.

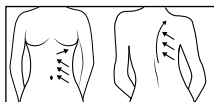

Partez de l'extérieur et progressez respectivement de biais vers le haut, en direction du centre du corps.
 Terminez par un mouvement montant vers l'extérieur.

Jambes

Choisissez le programme **P1** ou **P2** pour les parties du corps les plus flasques.
 Traitez le reste des parties avec **P2** ou **P3**.



Progressez légèrement de biais vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur, et terminez respectivement par un mouvement vers le haut.



Progressez horizontalement de l'intérieur vers l'extérieur et terminez respectivement par un mouvement vers le haut.




Commencez respectivement sur la face extérieure de la cuisse et progressez en diagonale vers le haut en direction du centre du corps.




Commencez respectivement sur la face intérieure de la cuisse et progressez par mouvements diagonaux montants vers la face avant ou arrière de la jambe.

Fessiers

Choisissez le programme **P2** ou **P3**.

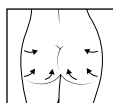


Déplacez l'appareil sur la moitié respective des fessiers en formant un arc de l'extérieur vers l'intérieur.

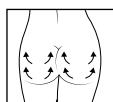

Déplacez l'appareil sur la moitié respective des fessiers en formant un arc de l'intérieur vers l'extérieur.

Décolleté


Choisissez le programme **P1** ou **P2** pour les parties du corps les plus flasques.
Traitez le reste des parties avec **P2** ou **P3**.

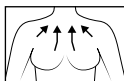

Progressiez de bas en haut.

Bras

Choisissez le programme **P1** ou **P2** pour les parties du corps les plus flasques.
Traitez le reste des parties avec **P2** ou **P3**.

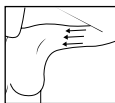

Progressiez du coude vers l'aisselle.

Nettoyage

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- ▶ Débranchez toujours l'appareil de l'adaptateur secteur **7** avant de le nettoyer.

ATTENTION - RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- ▶ N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou de solvants. Ces derniers peuvent endommager les surfaces.
- ◆ Nettoyez les ventouses après chaque utilisation avec soin dans de l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Veillez à bien les sécher avant de les réutiliser ou de les ranger.
- ◆ Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Si nécessaire, ajoutez un peu de produit vaisselle sur le chiffon et rincez avec un chiffon humidifié d'eau claire.
- ◆ Essuyez l'adaptateur secteur **7** et le cordon d'alimentation avec un chiffon humide si nécessaire. Assurez-vous que l'adaptateur secteur **7** et le cordon d'alimentation soient entièrement secs avant de les réutiliser.

Rangement

- ◆ Nettoyez l'appareil comme indiqué au chapitre **Nettoyage**.
- ◆ Rangez l'appareil et les accessoires dans la pochette de rangement **6** dans un endroit sec.

Recyclage

Recyclage de l'adaptateur secteur / de l'appareil



Ne jetez en aucun cas l'appareil et l'adaptateur secteur avec les ordures ménagères.

Ces produits sont assujettis à la directive européenne 2012/19/EU.



Recyclez l'appareil et l'adaptateur secteur par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets agréée ou du service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.

REMARQUE

- La batterie intégrée dans cet appareil ne peut pas être retirée pour être recyclée. Pour éviter tout risque, le démontage ou le remplacement de la batterie est une opération exclusivement réservée au fabricant ou à son service après-vente ou à une personne détentric de qualifications similaires. Lors du recyclage, il convient d'attirer l'attention sur le fait que cet appareil renferme des batteries.

Recyclage de l'emballage



Le recyclage de l'emballage en filière de revalorisation permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.





Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : Plastiques, 20-22 : Papier et carton, 80-98 : Matériaux composites

REMARQUE

- Dans la mesure du possible, conservez l'emballage d'origine pendant la période sous garantie pour pouvoir emballer et expédier l'appareil en bonne et due forme si vous étiez amené à faire valoir la garantie.

Annexe

Caractéristiques techniques

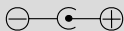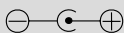Appareil	
Tension d'entrée	5 V  (courant continu)
Courant absorbé	1 A
Polarité	
Batterie	Batterie Li-Ion  (courant continu) 3,7 V, 800 mAh
Adaptateur secteur	
Type	DS006A0500100HE
Fabricant	Dozen
Tension d'entrée	100 - 240 V ~ (courant alternatif), 50/60 Hz
Courant absorbé	0,15 A
Tension de sortie	5,0 V  (courant continu)
Courant de sortie	1,0 A
Classe de protection	II /  (Double isolation)
Classe d'efficacité	6 
Température ambiante nominale (ta)	40 °C
Polarité	
Transformateur de sécurité	
Bloc d'alimentation à découpage	
Indice de protection	IP 20 : Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm.

Garantie de Kompernass Handels GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date de l'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse d'origine. Ce document servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par nos soins, selon notre choix. Cette prestation de garantie nécessite dans un délai de trois ans la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de garantie est valable pour des vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. connecteur, accu, moules ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L211-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L211-4 à L211-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L211-16 du Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L211-5 du Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L211-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (par ex. IAN 12345) en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique, une gravure, sur la page de garde de votre manuel d'utilisation (en bas à gauche) ou sous forme d'autocollant au dos ou sur le dessous.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pouvez télécharger ce manuel ainsi que beaucoup d'autres, des vidéos produit et logiciels.

Service après-vente

FR

Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: kompernass@lidl.fr

BE

Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 313165

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	20
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
Lieferumfang	21
Gerätebeschreibung	21
Sicherheitshinweise	22
Funktionsweise	25
Vor dem ersten Gebrauch	25
Anwenden	26
Aufsätze	27
Programme	27
Anwendungsbeispiele	28
Gesicht	28
Bauch / Taille	28
Bauch / Rücken	29
Beine	29
Gesäß	29
Dekolleté	30
Arme	30
Reinigen	30
Aufbewahren	30
Entsorgen	31
Gerät / Netzadapter entsorgen	31
Verpackung entsorgen	31
Anhang	32
Technische Daten	32
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	33
Service	34
Importeur	34

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient dem Vakuum-Massieren der Haut.

Das Gerät ist ausschließlich zur Eigenanwendung im privaten Bereich, nicht für den medizinischen oder gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Die Behandlung mit dem Gerät ersetzt keine ärztliche Behandlung. Wenden Sie das Gerät nicht an Tieren an.

Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt.

WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Vakuum-Massagegerät
- 2 Aufsätze
- Netzadapter
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung

GEFAHR

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. **Es besteht Erstickungsgefahr.**
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklapptseite)

- ➊ Drehregler
- ➋ Ein-/Ausschalter
- ➌ Programm-Schalter
- ➍ Kontrollleuchte
- ➎ Anschluss für den Netzadapter
- ➏ Aufbewahrungstasche
- ➐ Netzadapter
- ➑ großer Aufsatz
- ➒ kleiner Aufsatz

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Betreiben und laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes/des Netzadapters übereinstimmen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- ▶ Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- ▶ Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht selbst öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- ▶ Tragen oder ziehen Sie das Gerät nie am Netzkabel.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker, Netzkabel oder Netzadapter sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden oder duschen. Lagern oder bewahren Sie es nicht an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, der Netzadapter defekt ist, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, wenn es herunter oder ins Wasser gefallen oder beschädigt worden ist.
- ▶  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Wenden Sie das Gerät niemals an Tieren an.
- ▶ Das Gerät sollte nicht angewendet werden bei: schweren Herz- und Kreislaufbeschwerden, chronischer Leber- oder Nierenerkrankung, Hautkrankheiten, Krampfadern, offenen Wunden, jungen Operationsnarben, Schwangerschaft.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht unter Decken oder Kissen.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Brechen Sie die Behandlung mit dem Gerät sofort ab, wenn Sie diese als unangenehm empfinden oder Schmerzen haben.
- ▶ Behandeln Sie die gleiche Körperregion nicht zu lange oder zu kräftig und nicht mehrmals hintereinander.
- ▶ Unsachgemäße oder übermäßige Anwendung kann zur Entstehung von harmlosen, aber unschönen Blutergüssen führen.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶  Benutzen Sie den Netzadapter und das Gerät nur in Innenräumen.
- ▶ Verwenden Sie Cremes oder Öle bei der Anwendung des Gerätes nicht im Übermaß. Dies könnte die Funktion des Gerätes beeinträchtigen und die Haltbarkeit verkürzen.
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Funktionsweise

Bei der Vakuum-Massage wird das Gewebe mittels Unterdruckbildung stimuliert. Dabei werden die Hautschichten nicht wie bei der herkömmlichen Knetmassage zusammengedrückt, sondern durch den Unterdruck im Aufsatz auseinandergezogen.

Dadurch sollen auch tiefere Gewebeschichten erreicht und der Blut- und Lymphkreislauf in besonderem Maße stimuliert werden. Die Nährstoffversorgung der Haut soll verbessert und die Entschlackung des Gewebes gefördert werden.

Vor dem ersten Gebrauch

- ◆ Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel **Reinigen** beschrieben.
- ◆ Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal gebrauchen:
 - Verbinden Sie den Netzadapter **7** mit dem Anschluss **5** des Gerätes und stecken Sie den Netzadapter **7** in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte **4** leuchtet während des Ladevorgangs rot.
 - Lassen Sie das Gerät für **vier** Stunden laden und trennen Sie es dann vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden möchten.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Bevor Sie beginnen, informieren Sie sich unbedingt im Kapitel **Anwenden** über die sichere Handhabung des Gerätes, um Verletzungen zu vermeiden.

HINWEISE

- ▶ Die Kontrollleuchte **4** erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist. Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch dennoch für die empfohlene Zeit mit dem Stromnetz verbunden.
- ▶ Ist der Akku entladen, blinkt die Kontrollleuchte **4** rot. Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich das Gerät aus. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und laden Sie es auf.
- ▶ Sie können das Gerät auch während des Ladens benutzen. Nutzen Sie es jedoch nicht während des ersten Ladevorgangs.

Anwenden

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Um Blutergüsse zu vermeiden:

- ▶ Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die niedrigste Intensität eingestellt ist (Drehregler **1** auf „L“ = LOW, niedrige Ansaugleistung). Beginnen Sie immer mit der geringsten Intensität und steigern Sie bei Bedarf allmählich (Drehregler **1** Richtung „H“ = HIGH, starke Ansaugleistung).
- ▶ Gehen Sie vor allem bei der Behandlung von empfindlichen und schlaffen Körperregionen, wie z. B. dem Gesicht, besonders vorsichtig vor!
- ▶ Behandeln Sie die gleiche Körperregion nicht zu lange oder zu kräftig und nicht mehrmals hintereinander.
- ▶ Jeder Körper reagiert anders. Empfinden Sie eine Anwendung als unangenehm, verringern Sie die Ansaugintensität, ändern Sie die Körperregion oder brechen Sie die Behandlung ganz ab.

HINWEIS

- ▶ Wenden Sie das Gerät alle zwei Tage an, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
- ▶ Wenden Sie das Gerät nur auf Körperregionen mit ausreichend Fettgewebe an. Die Anwendung auf fettfreien Regionen erzielt kaum eine Wirkung und wird in der Regel als unangenehm empfunden.
- ▶ Reiben Sie die zu behandelnden Stellen mit etwas ölhaltiger Kosmetik ein (z. B. Baby-Öl), damit das Gerät leichter über die Haut gleitet.
- ▶ Durch Drücken des Drehreglers **1** können Sie das Vakuum jederzeit lösen.
- ◆ Montieren Sie den passenden Aufsatz **8** **9**. Siehe Kapitel **Aufsätze**.
- ◆ Wählen Sie mit dem Programm-Schalter **3** das passende Programm. Siehe Kapitel **Programme**.
- ◆ Vergewissern Sie sich, dass der Drehregler **1** ggf. auf „L“ (= LOW, niedrige Ansaugleistung) steht.
- ◆ Halten Sie die Öffnung des Aufsatzes **8** **9** auf die zu behandelnde Stelle und schieben Sie den Ein-/Ausschalter **2** auf „ON“. Die Kontrollleuchte **4** leuchtet grün im Akkubetrieb bzw. orange, wenn das Gerät gleichzeitig geladen wird. Das Gerät beginnt sofort die Luft anzusaugen und ein Vakuum im Aufsatz **8** **9** zu erzeugen.
- ◆ Bewegen Sie das Gerät gemäß den im Kapitel **Anwendungsbeispiele** beschriebenen Bewegungen über die Haut.
- ◆ Wechseln Sie in der Ansaugpause auf einen angrenzenden Bereich. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Bereiche **nicht** überlappen. Sie sollten die gleiche Stelle nicht mehrmals hintereinander behandeln!

- ◆ Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter **2** auf „OFF“. Die Kontrollleuchte **4** erlischt.
- ◆ Entnehmen Sie den Aufsatz **8** **9** vom Gerät.
- ◆ Reinigen Sie die benutzten Aufsätze wie im Kapitel **Reinigen** beschrieben.

Aufsätze

Es sind zwei verschiedene Aufsätze im Lieferumfang enthalten:

Kleiner Aufsatz

Der kleine Aufsatz **9** ist für die Behandlung von kleinflächigen Körperregionen, wie z. B. dem Gesicht bestimmt.

Großer Aufsatz

Der große Aufsatz **8** ist für die Behandlung von größeren Flächen wie Bauch, Beine und Rücken vorgesehen.

Um die Aufsätze am Gerät anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Stecken Sie den Aufsatz **8** **9** so in den Gerätekopf, dass die Arretierungen am Aufsatz **8** **9** in die Aussparungen im Gerätekopf gleiten und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis der Aufsatz **8** **9** einrastet.
- ◆ Um den Aufsatz **8** **9** wieder zu entnehmen, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn, bis Sie ihn vom Gerätekopf lösen können.

Programme

Das Gerät verfügt über vier voreingestellte Programme mit jeweils unterschiedlicher Ansaugdauer:

Programm 1 (P1)

2 Sekunden Ansaugen, 1 Sekunde Ansaugpause

Wählen Sie **P1** für alle empfindlichen und schlaffen Körperregionen (z. B. Gesicht, Oberarm-Innenseiten etc.), vor allem für die ersten Behandlungen. Sprechen diese Stellen gut auf die Behandlung an, können Sie nach einigen Versuchen auch **P2** benutzen.

Programm 2 (P2)

4 Sekunden Ansaugen, 2 Sekunde Ansaugpause

Wählen Sie **P2**, wenn Sie bereits mit dem Gerät vertraut und der Ansicht sind, dass Sie die Ansaugdauer steigern können. Wenn Sie sich unsicher sind, beginnen Sie besser mit **P1**.

Programm 3 (P3)

6 Sekunden Ansaugen, 2 Sekunde Ansaugpause

Wählen Sie **P3** für straffe und feste Körperregionen. Wenn Sie sich unsicher sind, beginnen Sie besser mit **P2**.

Programm 4 (P4)

Durchgängiges Ansaugen, keine Ansaugpause

Mit diesem Programm können Sie die Behandlung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wählen Sie **P4** allerdings nur, wenn Sie bereits ausreichend Erfahrung mit dem Gerät gesammelt haben und wissen, wie Ihr Körper auf die Behandlung reagiert. Durch Drücken des Drehreglers **1** lösen Sie das Vakuum.

Anwendungsbeispiele

In diesem Kapitel werden verschiedene Anwendungsbeispiele für die möglichen Körperpartien vorgestellt. Befolgen Sie diese Beispiele für ein optimales Ergebnis. Beginnen Sie immer mit der geringeren Ansaugdauer (z. B. **P1** statt **P2**) und der niedrigsten Ansaugintensität (Drehregler **1** auf „L“), vor allem wenn Sie noch wenig Erfahrung mit dem Gerät gesammelt haben.

Die Bilder stellen jeweils die Behandlung für eine Körperhälfte dar. Wiederholen Sie die Behandlung genau so auf der anderen Körperhälfte.

Die Pfeile in den Abbildungen geben die Bewegungsrichtung vor, mit der Sie die Behandlung durchführen sollen.

Bei schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. der Rückenpartie, kann es sinnvoll sein, eine zweite Person um Hilfe zu bitten.

Gesicht


Wählen Sie ausschließlich das Programm **P1**, die Gesichtspartie ist in der Regel sehr empfindlich.




Arbeiten Sie sich immer von der Gesichtsmitte nach außen vor.

Bauch / Taille

Wählen Sie das Programm **P1** oder **P2** für die schlaffsten Körperstellen. Behandeln Sie die restlichen Partien mit **P2** oder **P3**.

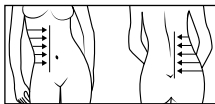


Arbeiten Sie sich horizontal von außen Richtung Körpermitte vor.

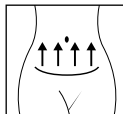


Arbeiten Sie sich vertikal von unten nach oben vor.

Bauch / Rücken

Wählen Sie das Programm **P1** oder **P2** für die schlaffsten Körperstellen. Behandeln Sie die restlichen Partien mit **P2** oder **P3**.

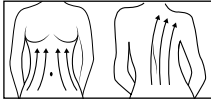

Beginnen Sie außen und arbeiten Sie sich jeweils von unten nach oben vor.

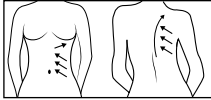

Beginnen Sie außen und arbeiten Sie sich jeweils nach schräg oben Richtung Körpermitte vor. Schließen Sie mit einer Aufwärtsbewegung nach außen ab.

Beine

Wählen Sie das Programm **P1** oder **P2** für die schlaffsten Körperstellen. Behandeln Sie die restlichen Partien mit **P2** oder **P3**.



Arbeiten Sie sich leicht schräg abwärts von außen nach innen vor und schließen Sie jeweils mit einer Bewegung nach oben ab.



Arbeiten Sie sich horizontal von innen nach außen vor und schließen Sie jeweils mit einer Bewegung nach oben ab.




Beginnen Sie jeweils an der Außenseite des Schenkels und arbeiten Sie sich diagonal nach oben und Richtung Körpermitte vor.




Beginnen Sie jeweils an der Innenseite des Schenkels und arbeiten Sie sich in diagonalen Bewegungen aufwärts zur Vorder- bzw. Rückseite des Beins vor.

Gesäß

Wählen Sie das Programm **P2** oder **P3**.

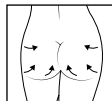


Bewegen Sie das Gerät auf der jeweiligen Gesäßhälfte bogenförmig von außen nach innen.

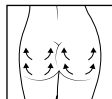

Bewegen Sie das Gerät auf der jeweiligen Gesäßhälfte bogenförmig von innen nach außen.

Dekolleté


Wählen Sie das Programm **P1** oder **P2** für die schlaffsten Körperstellen.
Behandeln Sie die restlichen Partien mit **P2** oder **P3**.

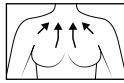

Arbeiten Sie sich von unten nach oben vor.

Arme

Wählen Sie das Programm **P1** oder **P2** für die schlaffsten Körperstellen.
Behandeln Sie die restlichen Partien mit **P2** oder **P3**.

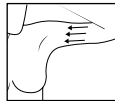

Arbeiten Sie sich vom Ellbogen aus Richtung Achselhöhle vor.

Reinigen



STROMSCHLAGGEFAHR

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Netzadapter **7**.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösemittel. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
- ◆ Reinigen Sie die Aufsätze nach jedem Gebrauch sorgfältig mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie sie verstauen oder erneut verwenden.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Geben Sie bei Bedarf ein wenig Spülmittel auf das Tuch und wischen Sie mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nach.
- ◆ Wischen Sie den Netzadapter **7** mit dem Netzkabel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter **7** und das Netzkabel vor einer erneuten Benutzung vollkommen getrocknet sind.

Aufbewahren

- ◆ Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel **Reinigen** beschrieben.
- ◆ Verstauen Sie das Gerät und das Zubehör in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche **6** und lagern Sie alles an einem trockenen Ort.

Entsorgen

Gerät / Netzadapter entsorgen



Werfen Sie das Gerät und den Netzadapter keinesfalls in den normalen Hausmüll.

Diese Produkte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.



Entsorgen Sie das Gerät und den Netzadapter über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

HINWEIS

- Der integrierte Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Gerät Akkus enthält.

Verpackung entsorgen



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.





Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe

HINWEIS

- Heben Sie, wenn möglich, die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anhang

Technische Daten

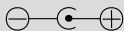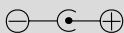Gerät	
Eingangsspannung	5 V  (Gleichstrom)
Stromaufnahme	1 A
Polarität	
Akku	3,7 V  (Gleichstrom) 800 mAh Li-ion Akku
Netzadapter	
Typ	DS006A0500100HE
Hersteller	Dozen
Eingangsspannung	100 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Stromaufnahme	0.15 A
Ausgangsspannung	5.0 V  (Gleichstrom)
Ausgangsstrom	1.0 A
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Effizienzklasse	6 
Nenn-Umgebungstemperatur (ta)	40 °C
Polarität	
Sicherheitstransformator	
Schaltnetzteil	
Schutzart	IP 20: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von > 12,5 mm.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 313165

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Version des informations - Stand der Informationen:
12/2018 - Ident.-No.: SVM3.7A1-102018-2

IAN 313165